

DECISION D'APPROBATION DE MODELE  
N° 92.00.615.006.1 DU 31 DECEMBRE 1992

## Fauteuil pèse-personne SECA modèle 942

(CLASSE III)

LA PRESENTE DECISION EST PRONONCEE EN APPLICATION DU DECRET N° 88-682 DU 6 MAI 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE, DU DECRET N° 65-487 DU 18 JUIN 1965, MODIFIE PAR LE DECRET N° 75-1201 DU 4 DECEMBRE 1975 REGLEMENTANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE : INSTRUMENTS DE PESAGE A FONCTIONNEMENT NON AUTOMATIQUE ET INSTRUMENTS DE PESAGE INDIQUANT LE PRIX.

### FABRICANT

VOGEL ET HALKE, 9-23 Hammersteindamm 2  
Hamburg 76 (Allemagne).

### DEMANDEUR

SOCIETE SECA, Z.I., rue Lavoisier, 91430 Igny.

### CARACTERISTIQUES

Le fauteuil pèse-personne SECA modèle 942 est composé :

- d'un dispositif récepteur de charge sur lequel est fixé un fauteuil,
- de leviers de transmission des forces,
- d'un dispositif indicateur constitué par une double romaine à poids curseurs apparents.

Il est équipé d'un dispositif de mise à niveau constitué de quatre vis moletées réglables, d'un indicateur de niveau à bulle, d'un dispositif de mise à zéro.

Le dispositif indicateur est situé en haut d'une colonne.

Les caractéristiques métrologiques du pèse-personne SECA modèle 942 sont les suivantes :

- Max = 150 kg
- Min = 10 kg
- $e = d_a = 200$  g

### SCELLEMENTS

La cavité d'ajustage des curseurs est protégée par un plomb sur lequel est insculpée la marque de vérification primitive.

### CONDITIONS PARTICULIERES D'UTILISATION

Les limites particulières du fonctionnement en température du pèse-personne sont les suivantes : + 10 °C, + 40 °C.

### INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

Les indications signalétiques suivantes sont regroupées sur la plaque d'identification et de poinçonnage fixée au pied de la colonne :

- la marque : SECA, le type : 942,
- les caractéristiques métrologiques,
- les limites particulières de fonctionnement sous la forme : + 10 °C / + 40 °C,
- la mention "interdit pour toute transaction".

Le numéro de série, le nom et l'adresse du fabricant sont sur une étiquette située à côté de la plaque d'identification.

La marque, les caractéristiques métrologiques, la classe de précision sont situées sur le dispositif indicateur. La mention "interdit pour toute transaction" et les limites particulières de fonctionnement sont sur une étiquette disposée près du dispositif indicateur.

### DEPOT DE MODELE

Plans et schémas déposés à la sous-direction de la métrologie, à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France et chez le demandeur.

### VALIDITE

La présente décision a une validité de dix ans à compter de la date figurant dans son titre.

### ANNEXE

Photographie n° 5883.

POUR LE MINISTRE ET PAR DELEGATION :

PAR EMPÊCHEMENT DU DIRECTEUR DE L'ACTION REGIONALE  
ET DE LA PETITE ET MOYENNE INDUSTRIE,  
L'INGENIEUR EN CHEF DES INSTRUMENTS DE MESURE,

J. HUGOUNET

■ N° 5883

FAUTEUIL PESE-PERSONNE SECA 942

